



だいじな家族、患者さまの  
「きこえ」を手軽にチェック



聴力検査機専門メーカーが手掛ける  
かんたん片手で使える

# ヒアリングチェッカー

幼児の聴力検査や、高齢者施設への  
入居時の介護レベルチェックをもっと  
かんたんに！そんな声にお応えして  
開発しました。

最小

最軽量



手のひら  
サイズ

実寸



コミュニケーションを楽しもう

約75g! あつかいやすいコンパクト設計

### 3種の音圧と周波数

音圧 500Hz・1000Hz・4000Hz  
周波数 60dB・80dB・100dB  
(※500Hzの使用時のみ90dB)

Piiiiiii

### ご使用方法

操作者と観察者2人で検査周波数の設定をします。



小さな音(60dB)からはじめましょう。



基本は2人で行い、「操作者」は被検査者の後ろ側で、左右どちらかの耳から20cm程度離し音を鳴らします。「観察者」は被検査者の正面から表情をみて反応を確認します。左右どちら側からもお試しいただき、反応がない場合は音圧を上げるなどしてチェックしてください。異常がある場合は耳鼻科医等専門医療機関で受診してください。

### 本体仕様

- サイズ | 本体: W5.5×D3.0×H10.5cm  
スタンド: W7.0×D9.0×H5.0cm
- 質量 | 本体: 約75g、スタンド: 約60g
- 性能 | 測定音: ウォブルトーン  
測定周波数範囲: 500、1000、4000Hz  
測定デシベル範囲: 60、80、100dBspl (500Hz: 90dBspl)
- 電源 | 専用リチウムポリマー/1kHz 100dB  
連続動作で約6時間



低音圧 60 と電源スイッチ

測定音圧スイッチ

充電スタンド付き

片手で使える  
ヒアリングチェッカー

906-403 | ￥99,000 (税込)

「きこえ」に関してのお困りごとには、専門スタッフが対応いたします。

100年先も「らしく」



株式会社 三和製作所

ミミー電子事業部: 〒190-0003 東京都立川市栄町6-16-1  
tel.042-538-3316 fax.042-538-3317



<お問い合わせは>

平日10:00-18:00(土日祝日除く)



0120-331-756