

類別:機械器具73補聴器 管理医療機器

JMDNコード:34672000 一般的名称:耳あな型補聴器

# 販売名:耳あな型補聴器 M-03

## 【禁忌・禁止】

幼児などの手の届かないところに保管すること。  
補聴器や電池は飲み込むと危険である。

大きな音で聞き続けないうこと。

大きな音で聞き続けると、更に聞こえを悪くすることがある。  
また、補聴器からピーピー音が発生するハウリング状態で使用し続けると、聞こえを悪くすることがある。


他人に補聴器を貸さないこと。

他人の耳を傷めることがある。

かゆみやかぶれに注意すること。

体質によって、かゆみやかぶれを生じる場合がある。  
皮膚に異常を感じたときは使用を中止し、専門医に相談すること。

## 【形状・構造及び原理等】

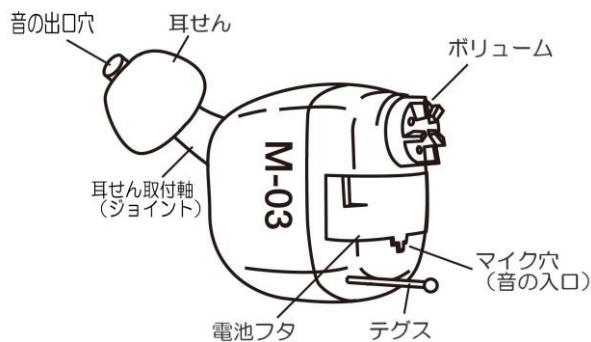

寸法: W10.5×H12.7×D9.75mm  
質量: 約 1.17g(電池、耳せん含む)

材質: 本体 ポリアミド樹脂  
耳せん シリコン

使用電池: 空気電池 312(PR41) 1.4V 1個

原理: 音を適切な大きさに増幅して耳に伝えることにより  
聴力を補う

90dB最大出力音圧レベル(ピーク値): 127dB 以下

最大音響利得(規準周波数): 30dB ±5dB

電撃保護: 内部電源機器 BF 形装着部

## 【使用目的又は効果】

耳せんを耳に差し込んで使用し、難聴者の聴力を補う  
レディーメイドタイプ補聴器

## 【使用方法等】

耳せんを耳せん取付軸に付け、片耳に装着して本体で増幅した音を聴きます。ボリュームを回し、聞きやすい音の大きさに合わせます。

(相手の声や周囲の音の大きさに応じてこまめに調整して下さい)

詳細は、付属の「取扱説明書」を参照して下さい。

## 【使用上の注意】

- ・次の場合は補聴器の使用を中止すること。  
耳漏、耳垢、耳の中の痛み、難聴の進行、めまい、頭痛、痒み、湿疹が認められるとき。
- ・取扱説明書に従い、指定の電池を使用すること。
- ・MRI（磁気共鳴画像診断装置）の診断を受けるときや、マイクロ波治療器などの電磁波を利用した装置を使用して治療する場合は補聴器を外すこと。
- ・大きな音で聞き続けると耳を傷めることがある。

## 【保管方法及び有効期間等】

直射日光の当たる場所、高温・多湿の場所を避け、室温で保存すること。

保管環境: -10～50℃ 30～90%RH

電池寿命: 約 100～130 時間

電池寿命は、電池の種類または使用条件によって異なる場合がある。

## 【保守・点検に係わる事項】

補聴器本体や電池は、柔らかい布等を使用してお手入れをしてください。詳細は、付属の「取扱説明書」を参照してください。

## 【包装】

片耳/1箱

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

### 製造販売業者

#### ・ ミミー電子株式会社

〒190-0003 東京都立川市栄町 6 丁目 16 番 1 号

TEL: 042-538-3316 FAX: 042-538-3317

### 製造業者

#### ・ スターキーメキシコ (Starkey de Mexico S.A de CV)

Calle norte 7 Lote 2 y 3 Colonia Ciudad

Industrial H.Matamoros Tamaulipas CP 87499 Mexico

#### ・ ミミー電子株式会社

〒190-0003 東京都立川市栄町 6 丁目 16 番 1 号

取扱説明書を必ず参照してください。