

### 取扱説明書

●お買上いただきましてありがとうございます。  
●ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。  
●この取扱説明書は保証書を兼ねていますので、紛失しないよう必ず保管してください。



医療機器認証番号  
229AGBZX00116000  
MIMY ミミー電子株式会社

## 保証書

本書は、記載内容および保証規定に基づいて無料修理をお約束するものです。所定の事項をご記入の上、大切に保管してください。お買上の日から下記期間中故障が発生した場合に保証規定により無料修理いたします。

型名	ME-145	お住所
保証期間	ご購入日より1年間	
ご購入日	年 月 日	お名前
取扱販売店	住所 店名 電話	
		電話

MIMY ミミー電子株式会社  
〒190-0003 東京都立川市栄町6-16-1  
TEL:042-538-3316 FAX:042-538-3317

## 保証規定

- 取扱説明書に従った正しい使用状態で保証期間内に故障が生じた場合3~4項に該当する場合は除き無料修理いたします。
- 保証期間中に故障が生じた場合は、本保証書に現品を添えて、販売店もしくはサポートセンターにご持参またはお送りください。ご持参の際の交通費や送料等はお客様の負担にてお願いいたします。
- 保証期間においても、次の場合は有料修理となります。
  - 保証書記載欄にお客様のお名前、ご住所、お買上年月日の記載のない場合。
  - 取扱説明書によらない使用方や不当な修理や改造による故障および損傷の場合
  - 天災、地震、火災、盗難などの不可抗力による故障および損傷の場合
  - お買上後の落下や水没などによる故障および損傷の場合
- 電池、耳せん、イヤホンコードなど、本体以外の部品は消耗品とみなし、保証期間内であっても保証の対象といたしません。
- この保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- この保証書は日本国内においてのみ有効です。
- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、本書によりお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等のご不明な点は、販売店またはサポートセンターにご連絡ください。
- ご記入いただいた個人情報につきましては、修理の際の必要事項を確認するためのみに利用いたします。他の目的で利用することはありません。

## この補聴器のご使用について

- 次のような方は、ご使用になれない場合があります。まずは医師と相談の上ご使用ください。
  - ・耳の手術を受けたことがある方。
  - ・耳だれのある方。 ・耳あかの多い方。
  - ・急性、または慢性的めまいがある方。
  - ・外耳道に湿疹や痛み、不快感などがある方。
  - ・過去90日以内に突発性難聴や進行性の聴力低下があった方。
  - ・過去90日以内にどちらかの耳に聴力低下があった方。

## 故障かな？と思ったら

●修理に出す前に必ずお読みください。

症状	原因	対処方法
音が出ない	・電池消耗 ・電池を入れる向きが違う ・イヤホンコードの断線	・新しい電池を入れる ・電池の+の向きを合わせて入れ直す ・新しいイヤホンコードと交換する ・MTスイッチがMになっている
音が小さい	・電池消耗 ・耳せんに耳垢が詰まっている	・新しい電池を入れる ・耳せんの耳垢を掃除する
音質がおかしい	・聞き取り調整の位置が不適当	・聞き取り調整の位置を変えてみる
ピーピーという音がする(ハウリング)	・耳穴に耳せんがぴったり入っていない ・音量が大きすぎる ・マイクロホンとイヤホンの距離が近すぎる	・耳せんを入れなおしてみる ・耳せんの大きさを変える ・音量を下げる ・マイクロホンとイヤホンを離す
雑音が出る音が途切れる	・イヤホンコードの断線 ・イヤホンコード先端のピンの接触不良(汚れ) ・電池の+、-接触面の汚れ	・新しいイヤホンコードと交換する ・イヤホンコード先端のピン部分を拭く ・電池の+、-接触面を拭く

これらの対処で直らないときは、まずは販売店または補聴器サポートセンターへお問い合わせください。

## 補聴器サポートセンター

ご購入後の修理や点検のご用命、別売品・消耗品のお求め、調整方法についてのご相談（病院でもらう聴力検査表をご用意ください。）など、補聴器に関することは、何でもお気軽にご相談ください。

MIMY ミミー電子株式会社  
**補聴器サポートセンター**  
〒190-0003 東京都立川市栄町6-16-1  
**TEL : 0120-331-756**  
**FAX : 042-538-3317**  
<http://www.mimy.co.jp>

受付時間 10:00~18:00  
月~金（祝祭日除く）  
都合によりお休みをいただいたり、受付時間帯を変更させていただくことがありますのでご了承ください。

## 使いかたは裏面をご覧ください。 安全上のご注意

- ここに示した警告サインと図記号の例は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や、他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。
- 表示と意味は次のようになっています。

**警告** 誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

**注意** 誤った取扱いをすると、人が傷害を負ったり\*物的損害の発生が想定される内容を示します。

\*物的損害とは、家屋、家財および家畜・ペットに関わる拡大損害を示します。

図記号の例

○記号は禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な禁止内容は、○の中や近くに文章や絵で示します。

!記号は強制（必ず守ること）を示します。具体的な強制内容は、!の中や近くに文章や絵で示します。左図の場合は一般的な強制を示します。

**警告**

- ・次のような方は、医師の指導を受けてからお使いください。事故や体調不良の原因になります。
  - ・お子様が使用するとき。
  - ・耳の治療を受けている方、治療したことのある方。
- ・次のような症状が表れたときは本製品の使用を中止し、すぐに医師にご相談ください。症状の悪化の原因になります。
  - ・本製品と接する皮膚がかぶれたり湿疹ができたとき。（本製品の皮膚に接する部分には炎症を起こしにくい材料を使用していますが、体質によっては稀にかぶれや湿疹が生じることがあります。）
  - ・使用中に耳だれが生じたり、何らかの事情で耳の治療が必要になったとき。
  - ・以前に比べ耳の聞こえが悪くなったとき。
- ・耳せん、電池等は乳幼児の手の届かないところに置いてください。乳幼児が飲み込む恐れがあります。飲み込んだときはすぐに医師の治療を受けてください。

- ・必要以上に大きな音で聞かないでください。耳を痛める原因になります。
- ・イヤホンコードやネックストラップを装着したまま就寝しないでください。首に巻き付いて窒息する恐れがあります。
- ・可燃性麻醉剤、酸素、高酸素濃度雰囲気での使用はしないでください。

**注意**

- ・イヤホンコードやネックストラップを持って振り回さないでください。事故やトラブルの原因になります。
- ・イヤホンコードを強く引っ張ったり、操作部に巻き付けたりしないでください。イヤホンコードが断線する可能性があります。
- ・イヤホン交換する際はプラグの先端をむやみに触らないでください。
- ・ペットが触れる範囲に置かないでください。遊んだり、かじったりして故障やトラブルの原因になります。

**注意**

- ・補聴器はあなたの聞こえを元に戻すものではありません。使い始めは音量を小さめにしてお使いください。大きすぎる音で聞いたり、耳に合わない使い方をすると耳を痛める原因になります。
- ・MRI（磁気共鳴画像診断装置）の診断を受ける時やマイクロ波治療器などの電磁波を利用した装置を使用して治療する場合は本製品を外してください。けがや故障の原因になります。
- ・電池の+、-極を正しく入れてください。補聴器が動作しません。場合によっては発熱や液漏れ、破裂などにより本製品の破損やけがの原因になります。
- ・指定の電池を使用してください。発熱や液漏れ、破裂などにより本製品の破損やけがの原因になります。
- ・外出の際は交換用の電池をお持ちください。事故やトラブルの原因になります。
- ・長期間（3ヵ月以上）使用しないときは電池を取り外してください。また、使用済みの電池はすぐに取り外し、新しいものと交換してください。液漏れなどにより本製品の破損やけがの原因になります。
- ・音量調整は他人にまかせず自分で行ってください。他人が行うと適切な調整ができず、耳を傷める原因になります。

- ・電池を加熱したり火の中に入れてたりしないでください。破裂などによりけがの原因になります。
- ・他人に本製品を貸したり他人から借りたりしないでください。耳に合わない耳を傷めたり耳の病気が感染する原因になります。
- ・本製品を取扱説明書記載以外の方法では使用しないでください。事故や故障の原因になります。
- ・乳幼児や自分で意思表示できない人に使用しないでください。事故やトラブルの原因になります。

## お願い

- ご使用いただくときは以下の項目に注意してください。故障の原因になります。
- ・激しい運動をするときは本製品を使用しないでください。
- ・ズボンの後ろポケットなど大きな力が加わる箇所への本体の収納はお控えください。
- ・洗面所や道路など落とすと壊れやすい場所での補聴器の付け外しは行わないでください。
- ・補聴器装着時、ヘアスプレーや香水など気化するものは使用しないでください。入浴時や洗顔時は外し、濡れたテーブルなどに置かないようにしてください。突然の雨や台風のとときもご注意ください。
- ・衣類が汗などで濡れているときは、胸ポケットに入れて使用しないでください。
- ・温度の高いところ（ストーブのそば、車の中など）に置かないでください。
- ・電子レンジ、食器乾燥機、ドライヤーなどの電機乾燥機で乾燥させないでください。
- ・分解や改造は行わないでください。また、マイク、イヤホンや内部を針やマッチ棒でつつかないでください。
- ・本体に強いショックを与えたり、落としたり踏んだりしないでください。
- ・プラグを無理に差し込まないでください。
- ・本体を水で濡らさないでください。濡らした場合は点検を依頼してください。
- ・磁気を発するものには近づけないでください。一部の携帯電話やコードレス電話では使用する際に補聴器に雑音が入ることがあります。その場合は携帯電話やコードレス電話を使用しないでください。
- ・ご不要になった補聴器は電池を取り出してから不燃物として処理してください。使用済みの電池はお住まいの市区町村の指導に従って処分してください。

## 性能及び仕様

項目	公称値	許容差
90dB 最大出力音圧 <sup>1)</sup> ℓ	ピーク値： 118dB	+3dB 以下
	HFA： 115dB	±4dB
最大音響利得	ピーク値： 56dB	+3dB 以下
	HFA： 44dB	±5dB
等価入力雑音 <sup>1)</sup> ℓ	26dB	+3dB 以下
全高調波ひずみ	500Hz： 5%	+3%以下
	800Hz： 12%	+3%以下
	1600Hz： 2%	+3%以下
電池の電流	7mA	+20%以下
誘導コイル入力の最大感度 <sup>1)</sup> ℓ	HFA： 81dB	±6dB

使用電池	単4アルカリ電池(LR03)
電池寿命	約170時間
本体の大きさ	W50×H80×D20 (mm)
重さ	約60g (電池、イヤホン、コード、耳せん含む)
電撃保護	内部電源機器 B形装着部
分類	IPX0 AP/APG 類機器ではない 連続作動機器
使用温湿度(使用環境)	10~40℃, 30~85%RH, 80k~106kPa
輸送及び保管環境	-10~50℃, 30~90%RH, 50k~106kPa

※左記数値はJIS-C5512：2015の2cm<sup>3</sup>カプラによる測定、表示です。  
※お断りなく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。  
※正常な使用時において補聴器の表面最大温度は42℃です。

